

瞬間冷却パック

この袋を切ったり破ったりしないでください。

内容成分

アンモニウム化合物
水

使用方法

- ①製品の中に水袋があることを確認してください。
- ②水袋をゲンコツで強めに叩いて、中の水袋を破裂させてください。
- ③水袋が破れると、周りの顆粒状の薬剤が水と溶け出し冷却が始まります。

利用上の注意

- ①本品は食べられません。口に入れたり、なめたりすることは絶対にしないでください。万が一飲み込んだ場合は、応急処置として水や牛乳、生卵などを飲ませた上で吐き出させ、直ちに医師に相談してください。
- ②万が一目に入った場合は、応急処置として流水で洗い流し、直ちに眼科医師に相談のうえ手当てを受けてください。
- ③袋が破け、皮ふや衣類に液が付いた場合は流水で十分洗い流してください。
- ④製品を長時間直接肌に接触させておきますと、凍傷を起こす恐れがあります。冷たすぎると感じた時は、タオルなどで包んでご使用ください。
- ⑤本品は、35℃以上の温度に放置すると中身が固まる場合があります。直射日光を避け、涼しい所に保管してください。

発熱・打身・ねんざ・やけどなどの応急処置に、戸外のレジャー・スポーツなどの冷却剤として、また、熱中症対策としてご利用ください。

- ⑥針や刃物など、突起物のある物の近くでご利用される場合は特にご注意ください。
- ⑦お子様だけの使用を避け、手の届かない場所に保管してください。
- ⑧使用後は燃えないゴミとしてお捨てください。なお、その際には製品が他の廃棄物により破れることのないよう、ご注意ください。



再利用について

- ①中が液状となった使用済み商品は、冷凍庫で冷やし蓄冷パックとしても再利用できます。

保冷時

- ①保冷時間の目安は、室温25℃での静置による計測で約20分です。
- ②振ったりもんだりしなければ、冷却時間は保てます。
- ③体温や周囲の温度など、ご使用時の状態によっても保冷時間が大きく変わる場合がありますのでご注意ください。

△ 水袋が破れ液体になったら、外袋が破れやすくなるため、絶対に叩かないでください。

- 万が一製品に不都合な点がございましたら、下記までご連絡ください。

製造元

株式会社アサヒ企画

☎ 0120-813-567

<http://www.asahikaku.co.jp>



外袋
VM-PET PE

MADE IN JAPAN