

表面

裏面

瞬間冷却パック

この袋を切ったり破ったりしないでください。

内 容 成 分
アンモニウム化合物
水

使 用 方 法

- ①製品の中に水袋があることを確認してください。
- ②水袋をゲンコツで強めに叩いて、中の水袋を破裂させてください。
- ③水袋が破れると、周りの顆粒状の薬剤が水と溶け出し冷却が始まります。

利用上の注意

- ①本品は食べられません。口に入れたり、なめたりすることは絶対にしないでください。万が一飲み込んだ場合は、吐き出し、直ちに医師に相談してください。
- ②万が一、袋が破損した際は使用を中止し、皮ふや衣類に液が付いた場合は流水で十分洗い流してください。
- ③万が一目に入った場合は、応急処置として流水で洗い流し、直ちに眼科医師に相談のうえ手当を受けてください。
- ④製品を長時間直接肌に接触させておきますと、凍傷を起こす恐れがあります。冷たすぎると感じた時は、タオルなどで包んでご使用ください。
- ⑤本品は、35℃以上の温度に放置すると中身が固まる場合があります。直射日光を避け、涼しい所に保管してください。

発熱・打身・ねんざ・やけどなどの
応急手当、戸外のレジャー・スポーツ
などでの冷却にご利用ください。

- ⑥針や刃物など、突起物のある物の近くで
ご使用される場合は特にご注意ください。
- ⑦お子様だけの使用を避け、手の届かない
場所に保管してください。
- ⑧使用後は市区町村の区分に従ってお捨てください。
なお、その際には製品が他の廃棄物により破れ
ることのないよう、ご注意ください。



⚠ 水袋が破れ液体になったら
外袋が破れやすくなるため
絶対に叩かないでください。

再利用について

- ①中が液状になった使用済み商品は、冷凍庫で冷やし蓄冷パックとしても
再利用できます。

保 冷 時 間

- ①保冷時間の目安は、室温25℃での静置による計測で約50分です。
(氷点下から10℃までの保冷時間)
- ②振ったりもんだりしなければ、冷却時間は保てます。
- ③体温や周囲の温度など、ご使用時の状態によっても保冷時間が大きく
変わる場合もありますのでご注意ください。

製造元

株式会社アサヒ企画

☎0120-813-567

<http://www.asahikikaku.co.jp>

MADE IN JAPAN

製品サイズ: 180mm×110mm

印刷範囲: 160mm×90mm

シール面（袋のフチ四方10mm部分）は、1色のベタでしたら印刷可能です。※文字や柄は入れられません。

アウトライン化、画像の埋め込み済のデータでの御入稿をお願いいたします。